



POSEZYME-LF

ENZYMATIC DETERGENT

For Manual and Ultrasonic or Soaking
The Endoscopic Instruments and
General Equipments

✓ ส่วนประกอบสำคัญ

Ultra high performance multiple enzymes (Protease, Amylase, Lipase, Cellulase and Mannanase) และสารอื่นๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการออกฤทธิ์

✓ วิธีใช้

- ปริมาณการใช้

	อัตราส่วนผสม	ระยะเวลาที่แช่
แช่ล้างทำความสะอาดทั่วไป	4 - 5 cc./น้ำ 1 ลิตร	1 - 10 นาที
กรณีสกปรกมาก / แห้งกรัง	7.5 - 10 cc./น้ำ 1 ลิตร	1 - 10 นาที

- ควรขยายระยะเวลาในการแช่ ถ้าเครื่องมือมีคราบฝังแน่นมาก
- เครื่องมือหลังแช่ POSEZYME - LF ควรล้างให้สะอาด และเช็ดให้แห้งหมาด ๆ ก่อนแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ POSE-DEX (GLUTARAL DEHYDE SOLUTION) ในกรณีเป็น High-level disinfection หรือส่งฆ่าเชื้อวิธีอื่น ๆ
- เปลี่ยนน้ำยาล้าง POSEZYME - LF หลังการใช้งานทุกครั้ง หรืออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

✓ ข้อควรระวัง

- เครื่องมือที่ทำด้วย อลูมิเนียมไม่ควรแช่ใน POSEZYME - LF นานเกินกว่า 8 ชั่วโมง เพราะอาจมีผลต่อสีของวัสดุอลูมิเนียมได้ (Discoloration of Aluminum Surface)
 - * เครื่องมือที่ทำจากวัสดุ CARBON STEEL ไม่ควรแช่นานเกิน 5 นาที เพื่อป้องกันมิให้เกิดสนิม
 - * ควรใส่แว่นตา และผ้าปิดปากและจมูก ป้องกันตามหลักปฏิบัติทั่วไป หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำยากระเด็นเข้าตา หรือผิวหนัง
- ควรสวมเครื่องป้องกันดวงตา และชุดป้องกันสารเคมี (PPE) ที่เหมาะสม

✓ การเก็บรักษา

เก็บในห้องอุณหภูมิ 15-30°C หลีกเลี่ยงการเก็บในห้องที่อุณหภูมิร้อน

✓ คุณสมบัติ

- ใช้ล้างทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์โดยใช้ได้กับเครื่องมือแพทย์ ทันตแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดทั่วไป เครื่องมือที่มีส่วนประกอบของยาง เช่น
 - * ใช้กับเครื่องมือ Scopes ทุกชนิด โดยไม่ทำลายเลนส์ของเครื่องมือ
 - * อุปกรณ์ช่วยหายใจทั้งชนิดที่สอดใส่เข้าร่างกาย และชนิดที่สัมผัสภายนอกร่างกาย เช่น ET tube, Airway, สาย Suction, Tracheostomy tube, สายออกซิเจน, Nasal catheter, Mask เป็นต้น
 - * เครื่องมือที่มีขนาดเล็กที่ละเอียดซับซ้อน เช่นเครื่องมือผ่าตัดตา
 - * เครื่องมืออุลตราโซนิค

✓ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล

- สารเคมีเข้าตา
 - ให้ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากๆ โดยพยายามกรอกตาเพื่อให้น้ำชะสารเคมีออกให้มากที่สุด พบแพทย์โดยด่วน
- หกรดผิวหนัง
 - ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างด้วยน้ำไหลมากๆ ปฏิบัติตาม SDS หากไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์
- สูดดม
 - นำออกมารับอากาศบริสุทธิ์ ปฏิบัติตาม SDS
- กลืนกิน
 - ห้ามทำให้อาเจียน ปฏิบัติตาม SDS พบแพทย์โดยด่วน และนำจลาจลสารติดไปด้วย

✓ ขนาดบรรจุ

แกลลอน ขนาด 5 ลิตร



+66 (0) 2917-8681-4



posehealthcare@gmail.com
www.posehealthcare.com



1 Soi RamInthra 107, RamInthra RD.,
KhanNaYao, Bangkok, 10230
THAILAND.